

# Dr. Fritz®

Suc 3-09D

Saugen, Spülen und Koagulieren  
mit einer Handbewegung



## Saug-/Spülsystem

– Minimal-invasive Chirurgie –

- wirkungsabhängige Anwendung
- einfache Aufbereitung
- getrennte Wegeführung

# Saug-/Spül-System


Die neueste Generation des Saug-Spülsystems ist durch eine denkbar einfache Anwendung gekennzeichnet, dies gilt sowohl für den Chirurgen als auch für das Aufbereitungsteam. Die Funktionen werden in logischer Reihenfolge ausgelöst. Das lästige immer wiederkehrende Überlegen, welcher der Knöpfe gedrückt werden soll, wie bei bisherigen marktüblichen Systemen entfällt. Ein Verstopfen durch Koagula oder Gewebeteile ist praktisch ausgeschlossen, da sich das Ventil durch die Konstruktion selbst offen hält bzw. freiräumt.

- Ein-Ventil-System mit Doppelfunktion
- Einfachste Aufbereitung und Montage
- Getrennter Saug- und Spülweg bis zur Spitze
- Ventil selbstreinigend während des Gebrauchs
- Integrierter Instrumentenkanal
- Gleichzeitige monopolare HF-Anwendung




## Saugen, Spülen und Koagulieren mit einem Ventil

1 Kanal als Saug- und Spülweg.  
(Herkömmliche Technik)

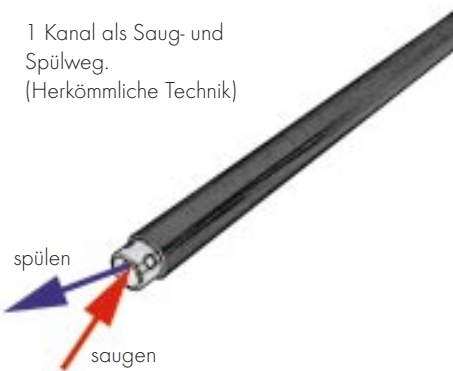


**NEU:**

Saug- und Spülweg bis zur Spitze getrennt.

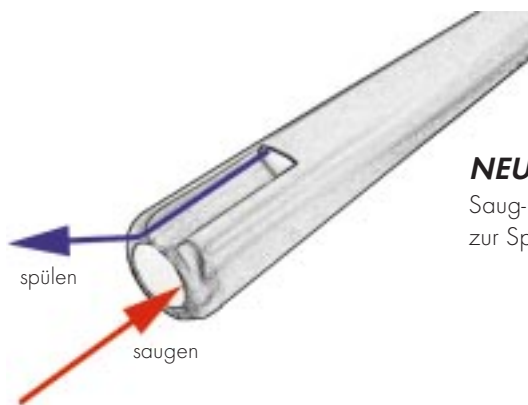

## Grundfunktion Saugen/Spülen

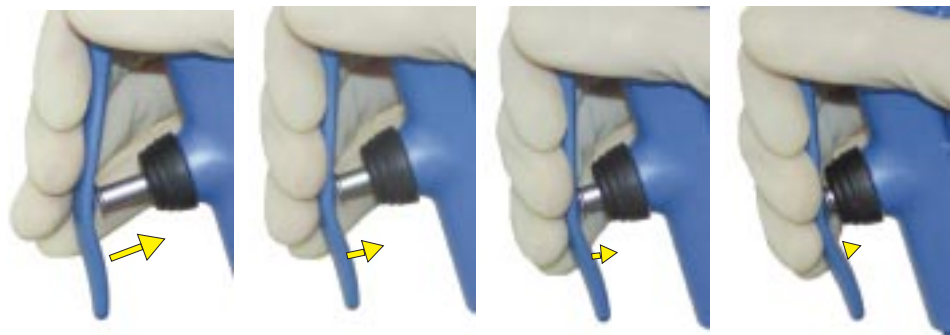

### Ruhestellung, stop

1. Ohne Druck auf den Hebel, Ventil ganz entlastet

### Saugen

2. Leichter Druck auf den Hebel, bis die Saugfunktion einsetzt.

### Zwischenstop

3. Übergangsposition

### Spülen

4. Voller Druck auf den Hebel

## Ersatzteile:



**RH18 Saug-Spülventil**, metall, passend zu RH98, komplett mit Ventil-Dichtkappe

**RH18-D10 Ventil-Dichtkappe** für RH18, silikon, Pg. mit 5 St.

**RH99-56 Dichtkappe für PE-Kanal** passend zum Saug-/Spülgriff RH98, Pg. mit 5 St.

**RH99-64 O- Ring-Satz** à 3x5 Stück (groß, mittel, klein)

## Zubehör:



**DE-3-456-E Reinigungsbürste** für lange Schaftröhre, für Rohre ID: 2,5 - 5 mm,

**RH99-47 Silikonöl**, 15 ml, (o. Abb.)

## 3 und 5 mm Rohre, einfache Kanalführung



metall, gelocht



metall, gelocht



isoliert, gelocht

Rohr Ø	Länge	Artikel-Nummern	Griff	komplettes Instrument	Saug-/Spülweg
<b>3 mm</b>	21 cm	SM1-32	RH98	SM1-32RH98	1 (ein Kanal)
	30 cm	SM1-33	"	SM1-33RH98	1
<b>5 mm</b>	21 cm	SM1-52	"	SM1-52RH98	1
	30 cm	SM1-53	"	SM1-53RH98	1
	37 cm	SM1-54	"	SM1-54RH98	1
<b>5 mm</b>	30 cm	SM2-53	"	SM2-53RH98	1
	37 cm	SM2-54	"	SM2-54RH98	1
<b>5 mm</b>	21 cm	SK1-52	"	SK1-52RH98	1
	30 cm	SK1-53	"	SK1-53RH98	1
	37 cm	SK1-54	"	SK1-54RH98	1

## 10 mm Rohre, getrennte Kanalführung



S9-13T2 Saugrohr, komplett mit Innenrohr (S9-13) und Rändel (RH99-10)



13T2 Außenrohr, metall, rund



S9-13 Innenrohr, mit Rändel (RH99-10), passend zu allen Außenrohren 13T2-6



Olive, metall



Rohr Ø	Länge	Artikel-Nummern Innenrohr/Außenrohr	Griff	komplettes Instrument	Saug-/Spülweg
10 mm	30 cm	S9-13 13T2	RH98	S9-13T2RH98	2 (Kanäle getrennt)
10 mm	30 cm	" 13T3	"	S9-13T3RH98	2
10 mm	30 cm	" 13T4	"	S9-13T4RH98	2
10 mm	30 cm	" 13T5	"	S9-13T5RH98	2
10 mm	30 cm	" 13T6	"	S9-13T6RH98	2

### Saug-/Spülsystem nach Dr. Fritz

im Vertrieb von:

